

# INTRUSOL® AF+

## Instrumentendesinfektion für Ultraschallbad und Einlegeverfahren

### Charakteristik

INTRUSOL® AF+ ist ein hochwirksames Instrumentendesinfektionsmittel. Es ist durch niedrigste Einsatzkonzentrationen sehr wirtschaftlich bei Ultraschallbädern sowie bei Einlegeverfahren. Sehr gute Reinigungseigenschaften bei guter Materialverträglichkeit. VAH-zertifiziert. IHO-gelistet.

### Inhaltsstoffe

In 100 g sind enthalten: 5 g Alkyldimethylethylammoniummethylsulfat, 1 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 1,8 g Cocospropylenguanidiniumdiacetat. Weitere Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, Duftstoffe.

### Wirkungsspektrum

#### Konzentrationen / Einwirkzeiten:

2 % / 60 Min., 3 % / 30 Min., 4 % / 15 Min.

#### Begrenzt viruzid: Behüllte Viren:

BVDV / HCV / Vaccinia: 2 % / 15 Min.

#### Unbehüllte Viren:

Adeno: 4 % / 120 Min., Rota: 2 % / 5 Min.

Wirksam gegen: Bakterien, Hefen, M. tuberculosis, M. terrae, alle behüllten Viren und die unbehüllten Viren Adeno und Rota.

### Anwendung

Für alle Anwendungsbereiche, in denen ärztliches Instrumentarium aufbereitet wird.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

### Haltbarkeit

INTRUSOL® AF+ kann mindestens bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden.

Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck).

Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25°C erfolgt.



REF	Artikel	Karton	Europalette
00973	2 l Flasche	6 x 2 l	32 Karton
00974	5 l Kanister	2 x 5 l	52 Karton
<b>Zubehör</b>			
00928	2 l Dosierpumpe		
00931	5 l Kanisterdosierpumpe		
00932	5 l Kanisterschlüssel		
00996	2 l + 5 l Kanisterhahn		